

本体

FRONT



SIDE



BACK



仕様

●販売名	トライレクトHV
●医療機器認証番号	306AFBZX00006000
●一般的名称	低周波治療器
●JMDNコード	35372000
●医療機器の分類	特定保守管理医療機器
●電撃に対する保護の形式	クラスII機器
●電撃に対する保護の程度	BF形装着部
●定格電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
●電源入力	80VA
●本体寸法(約)	幅360mm×奥行237mm×高さ93mm
●本体重量(約)	3.6kg
●出力波形	パルス波
●出力チャンネル数	4
●治療時間	1~99分
●最大出力電流	エムキューブ波 70mA _{rms} (500Ω負荷時) HV波 40mA _{rms} (500Ω負荷時) MCR 750μA _{rms} (500Ω負荷時)
●最大出力電圧	エムキューブ波 100V _{p-p} (500Ω負荷時) HV波 300V _{p-p} (500Ω負荷時) MCR 1.0V _{p-p} (500Ω負荷時)
●最大出力周波数	エムキューブ波 2.7kHz HV波 400Hz MCR 2.7kHz
●最大パルス幅	エムキューブ波 156μsec HV波 50μsec MCR 156μsec

標準付属品

●ACアダプター	1個
●電源コード	1本
●取扱説明書(保証書つき)	1部
●標準同梱品リスト	1部
●メンテナンス下敷き	1部
●パッドコード1.7m(灰・黄・緑・橙)	各1本
●粘着導子(4枚入り)	2袋
●シューティング導子	1本
●電極φ30板ストレートタイプ	1個
●電極φ30板カーブタイプ	1個
●電極φ10球ストレートタイプ	1個
●電極スポンジφ30板用	1個

*仕様及び規格はお断りなしに変更することがあります。 *製品の色はカタログの色と異なる場合があります。



TRIZECT HV


低周波治療器 トライレクトHV

■製造販売元



■本製品のお問い合わせ先

販売店

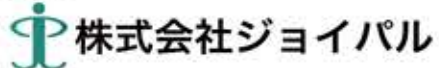

〒270-2203 千葉県松戸市六高台8-138-2
TEL04-7160-5455 FAX047-388-3081
<https://joypal.jp/>



[本 社] 〒956-0804 新潟県新潟市秋葉区疾病2-30-15
TEL.0250-21-8251 FAX.0250-24-2151

*本誌の一部または全部を無断で複製転載することは複製権(著作権法第21条)の侵害にあたり、また、それらをインターネットなどで公開することも公衆送信権(著作権法第23条)の侵害にあたり。

施設、店舗経営者・販売代理店向け資料
© Techno Link

T-P-91THV-CA2402-001



エムキューブ波 (M³)

皮膚への刺激を考え、よりソフトな刺激感を目指した波形です。大きな筋収縮を促す“ハンマー”を搭載し、モードにより好みに合わせて設定できます。

NEW!

独自開発 M³PRO波形

M³PRO波形を用いたEMSモードではソフトな刺激感でありながら大きな筋収縮を起こすことができるようになりました。



ハイボルテージ (HV)

最大300Vp-pの瞬間的な高電圧パルスによる電気刺激が皮膚抵抗を抑え、刺激感の少ない治療を可能にします。周波数やパルス幅など、好みに合わせて設定できます。

NEW!

新開発 パルス幅5 μ s搭載 2CH同時通電

5 μ sと2CH同時通電により理想のハイボルテージ治療が可能となりました。

NEW!

M³波形による 高周波マイクロカレント


高周波単極(-)微弱電流により治癒促進の効果が高まります。

マイクロカレント (MCR)

「エムキューブ波」をそのまま微弱電流とする独自の出力です。微細な電流による電気刺激で、筋の収縮が一切見られません。

コンビネーション

CH1とCH2・CH3とCH4の2チャンネル間、もしくはCH1～CH4の4チャンネル間で、それぞれの刺激をコンビネーションさせることで複雑な筋収縮を生み出すモードです。

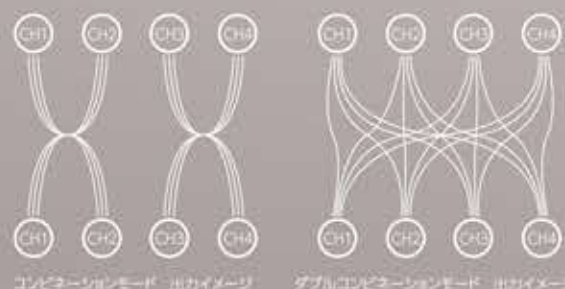

プログラムモード

低周波の波形や出力時間、極性の選択などを組み合わせて好みの出力プログラムを設定できます。



独立 4CH 出力だからできる多彩な治療

モードは2CH、治療時間、インターバル、出力レベルは4CHで独立した設定が可能です。症状や部位に合わせて同時にアプローチできます。

治療例



HVとエムキューブ波を出力しながら同時に異なる箇所を治療。

HVとコンビネーションモードを出力しながら同時に異なる箇所を治療。

ダブルコンビネーションモードで一部を重点的にアプローチ。

様々な治療ニーズに応える、多機能な一台

トライレクトHVはエムキューブ波、HV、マイクロカレントの3つの波形を一台で出力可能な、独立4CH低周波治療器です。

従来の導子類に加え、新たにシューティング導子を標準付属。

波形だけでなく、治療箇所へのアプローチも幅広く、様々な治療ニーズに応えることができます。

多彩な導子

シューティング導子



安定したホールド性があり、手に馴染むので患部に適度な圧を加えることができます。

粘着導子



曲面や凹凸のある部位にもしっかりと貼り付けることができます。

Vスティック®



肩や腰など、ポイント的な治療に適しています。

※Vスティックはオプション品です。

ポイントプローブ®



筋や腱を把持しやすく、適度な圧を加えながら治療を行うことができます。

※ポイントプローブはオプション品です。